

EuroTest®



**Test de Bowie & Dick
à usage unique
prêt à l'emploi pour
autoclave vapeur.
EN 11140 - 4
Classe 2.**

MODE D'EMPLOI

Vérifier si l'**EuroTest®** n'a pas été utilisé, en contrôlant l'indicateur de passage (pastille rose).

Placer l'**EuroTest®** au milieu de l'autoclave vide, sur la grille, l'étiquette vers le haut.

Effectuer un cycle Bowie et Dick de 3,5 minutes (± 5 sec), à 134°C (0, +1,5°C) dans un autoclave chaud ou froid.

Une fois le cycle effectué, récupérer la feuille test placée à l'intérieur de l'**EuroTest®**.

Indiquer directement sur la feuille test de l'**EuroTest®**, aux endroits prévus à cet effet, les éléments de votre traçabilité.

L'**EuroTest®** doit être conservé avant emploi à température ambiante, à l'abri de l'humidité.



Année d'apposition : 2009


 **Sterlab** - Sophia Antipolis - 2720 Ch. St-Bernard - 06224 Cedex
Tél : +33(0)4 97 24 58 58 - Fax : +33(0)4 97 24 58 59

www.sterlab.com

INTERPRETATION DES RESULTATS


Test non exposé

Les bandes du test non exposé sont de couleur jaune pâle.

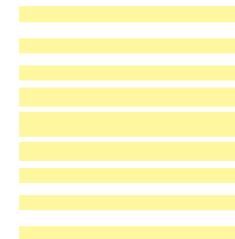

Résultat correct


Le résultat est correct si les bandes jaunes de la feuille test ont viré uniformément au noir ou au gris anthracite.

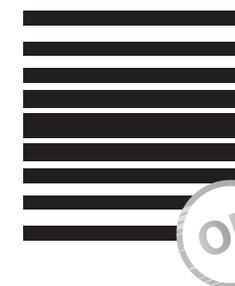

Résultat correct

Le résultat est correct si les bandes jaunes de la feuille test ont viré uniformément au noir avec une zone centrale légèrement voilée (couleur argentée).

Ce voile indique une surchauffe durant le cycle.

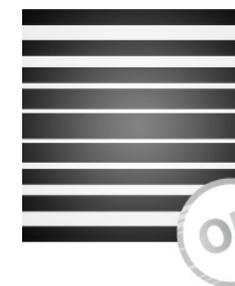

Résultat incorrect

Le résultat est incorrect si une tache jaune pâle apparaît sur la surface de la feuille test (mauvaise pénétration de vapeur).

Le plus fréquemment, cette tache se situe au centre de la feuille test.

