

UTILISATION EMBALLAGE CB/TDRY

Le **CB/TDRY** est composé de deux feuilles

CB (feuille bleue) qui est le système de barrière stérile SBS Premier pliage de 55 gr/m²


TDRY (feuille violette) qui est un emballage de protection EP de 75 gr/m² avec feuille absorbante soudée à celle-ci (couche blanche)

La norme 11 1607-1 demande un SBS et un EP indépendant pour constituer un système d'emballage stérile SES.

Il faut réaliser un double pliage avec la feuille bleue en interne et la feuille violette en externe.

La feuille violette va permettre de protéger le panier des différentes déchirures grâce à sa résistante (75 gr/m²) et d'absorber les condensats grâce à la cellulose présente sur la feuille (couche blanche)

ETAPE 1 : Pliage de la première feuille (Bleue)

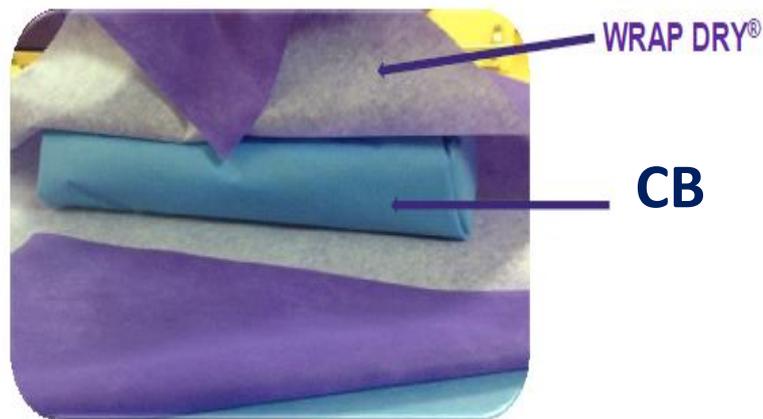

ETAPE 2 : Pliage de la seconde feuille (violette)

