


EuroTest®

L'union entre la qualité et le budget

Mode d'emploi




- Vérifier si l'**EuroTest®** n'a pas été utilisé en contrôlant l'indicateur de passage (pastille rose).

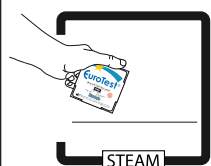


- Placer l'**EuroTest®** au milieu de l'autoclave vide, sur la grille, étiquette vers le haut.

- Effectuer un cycle Bowie & Dick de 3.5 minutes (± 5 sec) à 134°C (0+1.5°C) dans un autoclave chaud ou froid.

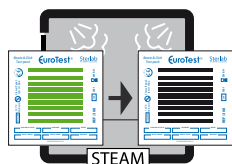

- Une fois le cycle effectué, récupérer la feuille test placée à l'intérieur de l'**EuroTest®**.

- Indiquer directement les éléments de traçabilité sur la feuille test de l'**EuroTest®**, aux endroits prévus à cet effet.

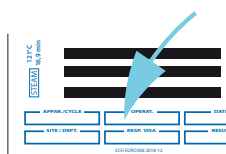

- l'**EuroTest®** doit être conservé avant emploi à température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Interprétation des résultats

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


Fig. 1
Test non exposé

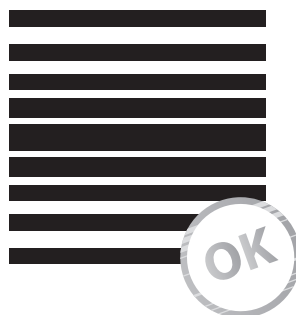


Fig. 2
Résultat correct
Les bandes sont uniformément noires ou grises.

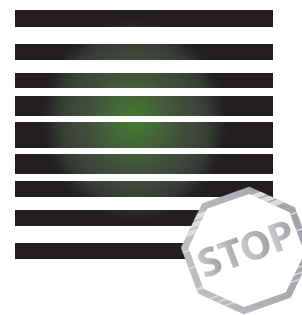


Fig. 3
Résultat incorrect
Une tache vert pâle apparaît le plus souvent au centre de la feuille test.