



Conforme à la norme
EN ISO 11140-4, Classe 2

Quickise®

MODE D'EMPLOI



- S'assurer que le test n'a pas déjà été utilisé en vérifiant que les flèches situées sur la languette de fermeture sont bien jaune pâle (l'encre vire au noir après utilisation).
- Placer le test directement à l'envers dans le panier ou au centre de la chambre vide de l'autoclave.
- Effectuer un cycle Bowie et Dick de 3,5 min (+/- 5 sec) à 134°C (0, +1,5°C).
- Dès que le cycle est terminé, arracher la languette de fermeture et tirer sur la feuille-test bleue.

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS

Vérifier le résultat conformément aux instructions données au dos du pack.



Fig. 1 - NON VIRÉ



Fig. 2 - RÉSULTAT CORRECT
Les rayures sont uniformément noires ou grises foncé.



Fig. 3 - RÉSULTAT INCORRECT
Une décoloration apparaît au centre de la feuille-test.
Le changement de couleur n'est pas uniforme.

Dernière révision : 2023-01