

Test d'étanchéité pour soudeuse

Seal Test

Objectifs


Vérifier si la soudeuse fonctionne de manière optimale grâce à la détection de toute anomalie ou irrégularité en température, pression et usure des galets lors du procédé de scellage.

Mode d'emploi


1. Placer le **Seal Test** dans un sachet. S'assurer que l'indicateur (bande noire) est placé à l'endroit où le sachet doit être soudé.
2. Souder le sachet. Durant tout le process de soudure, le film du sachet doit relier toute la surface de scellage du papier pour garantir que le joint d'étanchéité atteigne les critères de qualité.
3. Si la soudure n'a pas atteint la longueur entière du test, le **Seal Test** le confirmera.
4. Après un essai positif du **Seal Test**, inscrire les informations nécessaires sur le bas de la feuille.

Interprétation des résultats

Seal Test positif

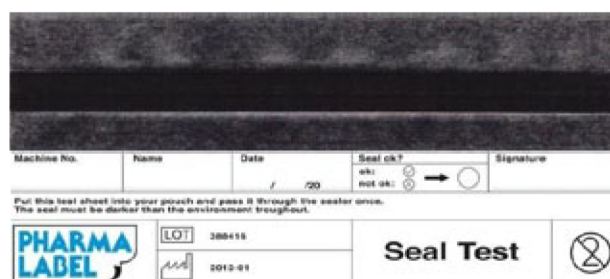


Interprétation des différents tests négatifs possibles

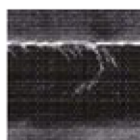


Température
pression trop
haute



Température
pression trop
faible

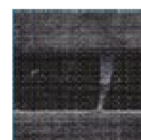

Petites déchirures
sur la soudure

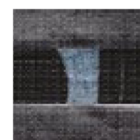

Cheminée

Référence **607SEALTEST**

Sachet de 250 unités