



## FICHE PRODUIT TCOVER

Références produits TCOVER001-002-003

Le **T Cover**, sac de protection pour emballages de stérilisation est fabriqué à partir d'un SMS 100% polypropylène de couleur mauve.

Ce SMS ne constitue pas une barrière stérile et doit impérativement être utilisé en combinaison avec un autre matériau de stérilisation lui-même barrière stérile pour obtenir un système d'emballage stérile conformément à la norme ISO 11607.

Sa couleur mauve a été choisie exprès afin de le différencier des autres feuilles de stérilisation barrière stérile qui sont communément blanches, vertes ou bleues.

Le **Tcover** est stérilisable à l'autoclave, hydrophobe, et avec une perméabilité aux gaz (air, vapeur...) beaucoup plus importante que les autres SMS.

Disponible sous forme de sacs de différentes tailles, avec un rabat de 90mm permettant d'assurer sa fermeture à l'aide d'un adhésif.

REFERENCE	TAILLE	CONDITIONNEMENT
TCOVER001	400 X 700+90 mm de rabat	200 sacs
TCOVER002	500 X 700 + 90 mm de rabat	200 sacs
TCOVER003	600 X 700 + 90 mm de rabat	100 sacs

### **Propriétés :**

Poids de base	83g/m <sup>2</sup>
Couleur	Mauve
Epaisseur	500μ
Tension SM :	2.7 kN/m. SM = Sens Machine
Tension ST :	1,3 kN/m. ST = Sens Travers
Perméabilité :	200 l/mn/100cm <sup>2</sup>
Etirement SM :	148,8%
Etirement ST :	175,5%
Perméabilité à l'air :	500 litres/min/100cm <sup>2</sup>
Extraction eau chaude :	Sans couleur

### **Mode d'emploi :**

Placer le plateau emballé à l'intérieur du TCOVER

Refermer le rabat

Assurer la fermeture en pliant trois fois avec les coins à l'intérieur puis sécuriser avec un adhésif.

### **Précautions d'emploi :**

Durée de la validité du produit 5 ans, sans composant dangereux pour la santé