


PROCOLE B&D ELECTRONIQUE WI SCAN

PROCOLE UTILISATION DU B&D ELECTRONIQUE

Contact: Housen OUAMMI
06 85 40 70 90

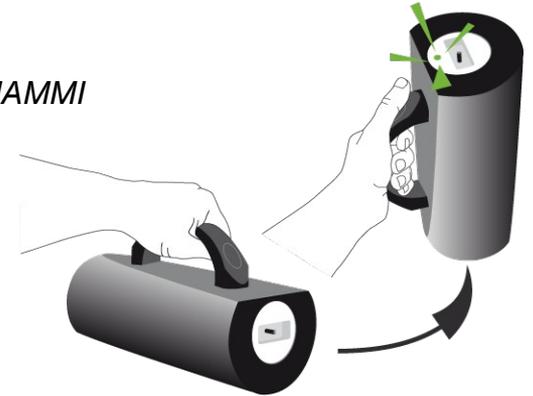

1. OUVRIR LA PORTE DE L'AUTOCLAVE ET METTRE LA GRILLE

2. ACTIVER LE B&D ATTENDRE QUE LA DIODE VERTE CLIGNOTE




3. METTRE LE B&D DANS L'AUTOCLAVE ET LANCER DIRECTEMENT LE CYCLE B&D **TOUT DE SUITE APRES ACTIVATION**

4. OUVRIR LA PORTE DE L'AUTOCLAVE DES LA FIN DU CYCLE B&D

REPONSE DU TEST B&D **POSITIF** SI CLIGNOTE **VERT**

REPONSE DU TEST B&D **NEGATIF** SI CLIGNOTE **ROUGE**

5. POSER LES 2 B&D L'UN A COTE DE L'AUTRE

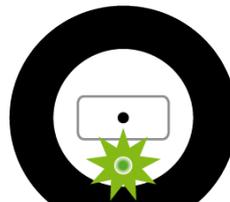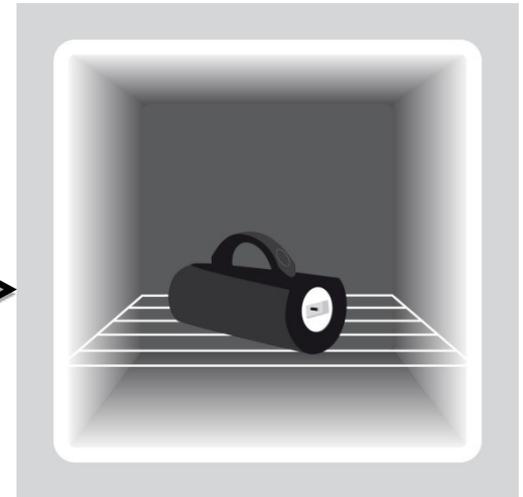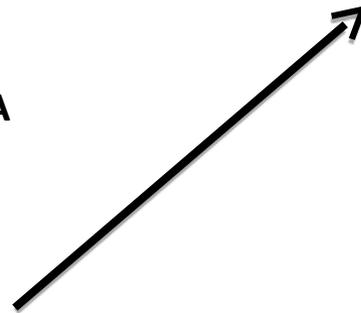

PROTOCOLE B&D ELECTRONIQUE WI SCAN

PROTOCOLE DE LECTURE DU B&D

Contact: Housen OUAMMI
06 85 40 70 90

UTILISATION DU LECTEUR WI SCAN

1. PRENDRE ET ALLUMER LE LECTEUR SE PLACER A COTE DES B&D
2. LE LECTEUR EST-IL PLACE PRES DE LA CHARGE? **REPENDRE OUI**
3. ATTENDRE QUE L'ECRAN INDIQUE **02 SONDES LUES** ET **APPUYER FIN**
4. CONFIRMER LA FIN DE LA LECTURE? **REPENDRE OUI** SI VOUS AVEZ **02 SONDES** LUES
5. RESUME DES ESSAIS SI OK **APPUYER SUR SUITE**
6. LE LECTEUR EST-IL CONNECTE AU PORT USB?
CONNECTER LE CORDON ET **ENSUITE REPENDRE OUI**



UTILISATION DU LOGICIEL WI SCAN

- LE PROGRAMME EST -IL OUVERT SUR L'ORDINATEUR?
DOUBLE CLIQUER SUR LE LOGICIEL WI SCAN ET **APPUYER OUI**
LE RESULTAT S'AFFICHE ENTREE LE NUMERO DE L'AUTOCLAVE EN
FONCTION DU NUMERO DE SERIE DU B&D



1. ENTRER LE NOM DE L' **AUTOCLAVE** EN FONCTION DE LA CASE
ATTRIBUTION



- ENTRER VOTRE NOM
- ENTRER LE NUMERO DE CYCLE
- S'ASSURER QUE TOUTES LES INFORMATIONS ENTREES SONT JUSTES ET CLIQUER SUR LE LOGO **ENREGISTRER**

1. DOUBLE CLIQUER SUR LE **SMILEY** ET IMPRIMER LES RESULTATS
2. FERMER LE LOGICIEL ET **ETEINDRE LE LECTEUR**



ou

